

TOTAL STIM

NE PAS UTILISER EN CAS DE GROSSESSE, DURANT 6 MOIS APRÈS UN ACCOUCHEMENT, EN CAS DE MALADIES NEUROMUSCULAIRES OU HÉMORRAGIQUES, SI PORTEUR D'UN PACEMAKER.

DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES SONT À PRENDRE DANS LES CIRCONSTANCES SUIVANTES :

- PERSONNES POUR LESQUELLES UN DIAGNOSTIC D'ÉPILEPSIE EST SUSPECTÉ.
- LORSQUE VOUS AVEZ UNE TENDANCE À UNE HÉMORRAGIE INTERNE OU DES SAIGNEMENTS CONSÉCUTIFS À UNE BLESSURE OU UNE FRACTURE.
- APRÈS UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. (L'ÉLECTROSTIMULATION PEUT INTERROMPRE LE PROCESSUS DE RÉTABLISSEMENT.)
- DANS LES RÉGIONS DE LA PEAU AYANT UNE DÉFICIENCE DE SENSIBILITÉ.

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN DANS LES CAS SUIVANTS :

- VOUS SOUFFREZ DE DOULEURS DORSALES IMPORTANTES.
- VOUS AVEZ UNE MALADIE GRAVE QUI N'EST PAS MENTIONNÉE DANS LE MANUEL.
- VOUS AVEZ SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE RÉCEMMENT.
- VOUS ÊTES DIABÉTIQUE ET SOUS INSULINE.